

## Caractéristiques masque anti-projections

---



Confection selon les recommandations de l'AFNOR



Deux couches de tissu en coton ou polycoton

Système d'attache par brides (meilleure résistance aux lavages à 60° que l'élastique)

Laver à 60°

Masque non homologué FFP2, ni UNS Catégorie 1 ou 2

### CONSEILS D'UTILISATION ET DE LAVAGE

Utilisation : le temps de port du masque est limité à 4 heures.

Recommandations de manipulation des masques :

- Avant de le mettre, se laver les mains à l'eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique
- appliquer le masque pour recouvrir le nez et la bouche et veiller à l'ajuster au mieux sur le visage
- vérifier l'absence de jet d'air dans les yeux lors d'une expiration forte
- lorsque l'on porte un masque : éviter de le toucher, de le déplacer et à chaque fois que l'on touche un masque usagé, se laver les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'une solution hydroalcoolique si besoin de boire ou de manger, changer de masque
- lorsqu'il s'humidifie, le remplacer par un nouveau masque et ne pas réutiliser des masques à usage unique
- pour retirer le masque : l'enlever par derrière (ne pas toucher le devant du masque); le jeter immédiatement dans une poubelle fermée ou dans un sac prévu à cet usage ; se laver les mains avec de l'eau et au savon ou à l'aide d'une solution hydroalcoolique.

Entretien du masque : après utilisation, le masque doit être isolé soit pour être jeté soit pour être lavé. Il est recommandé d'isoler le masque dans un sac plastique à jeter après usage ou dans un sac réutilisable à laver. Dans le cas du sac réutilisable, masque et sac peuvent être lavés ensemble et dans ce cas, sortir le masque du sac.

Explication sur la méthode de lavage : Lavage en machine ménager à 60°C avec détergent classique. Séchage en tambour. Ce masque a été conçu pour être réutilisé et lavé 10 fois.